

Protokół chirurgiczny – tioLogic® TWINFIT.



Protokół chirurgiczny należy dostosować

odpowiednio do wskazań i indywidualnej sytuacji

anatomicznej pacjenta.

X Głębokość nawiercania zgodna z długością implantu

⑦ 7.0 mm głębokość nawiercania

() Opcjonalnie

(uwzględniając jakość kości)

		kość miękka				
		ø 3.3	ø 3.7	ø 4.2	ø 4.8	ø 5.5
Wiertło oznaczające		X	X	X	X	X
Wiertło pilotujące ¹		X	X	X	X	X
Frez płaski ³		X	X	X	X	X
Pogłębiacz ø 3.3 ¹		(X) ⁴		X		
Pogłębiacz ø 3.7 ¹			(X) ⁴		X	X
Pogłębiacz ø 4.2 ¹				(X) ⁴		
Pogłębiacz ø 4.8 ¹					(X) ⁴	X
Pogłębiacz ø 5.5 ¹						(X) ⁴
Poszerzacz ø 3.3 ²		⑦				
Poszerzacz ø 3.7 ²			⑦			
Poszerzacz ø 4.2 ²				⑦		
Poszerzacz ø 4.8 ²					⑦	
Poszerzacz ø 5.5 ²						⑦
Gwintownik ³						

		kość średnia				
		ø 3.3	ø 3.7	ø 4.2	ø 4.8	ø 5.5
		X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X
		X		X		
			X		X	X
				X		
					X	X
						X
		⑦				
			⑦			
				⑦		
					⑦	
						⑦

		kość twarda				
		ø 3.3	ø 3.7	ø 4.2	ø 4.8	ø 5.5
		X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X
		X		X		
			X		X	X
				X		
					X	X
						X
		⑦				
			⑦			
				⑦		
					⑦	
						⑦
		(X)	(X)	(X)	(X)	(X)

¹ Głębokość nawiercania wiertła pilotującego, pogłębiacza i gwintownika zgodna jest z długością zaplanowanego implantu

² Głębokość nawiercania poszerzacza nie powinna przekraczać 7.00 mm. Gwintowniki używać poniżej momentu siły dla implantu > 40 Ncm. Przestrzegać oznaczeń głębokości.

³ Przykładowe przedstawienie gwintownika dla ø 4.2 mm (czerwony).

⁴ Opcjonalne zastosowanie lub jego brak w celu zwiększenia stabilizacji pierwotnej implantu w warstwie gąbczastej kości.